

# ello

Unabhängig und Selbstständig



10 von 10 Kunden  
würden ello  
weiterempfehlen



In Deutschland,  
Österreich und  
Schweiz erhältlich



In über  
100 Sanitätshäusern  
bis Ende 2018



Deutsches  
Unternehmen



Bekannt aus  
den Medien

# „Lebensfreude und Lebensqualität: ello“



Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

körperliche Bewegung und Sport werden häufig mit Jugend und Gesundheit in Zusammenhang gebracht. Dabei sind ein gesundes Herz-Kreislauf-System und eine starke Muskulatur in allen Lebensphasen wichtig. Denn genau so kann man unabhängig und selbstständig bleiben.

In einem gesunden Körper wohnt bekanntlich ein gesunder Geist. Also nichts wie raus und mit Nachbarn, Freunden und der Familie den Tag genießen.

ello, der elektrische Rollator, unterstützt Sie dabei Lebensqualität und Lebensfreude zu erhalten. Mit Wissenschaftlern und Medizinern gemeinsam entwickelt, ist ello heute einer der bekanntesten elektrischen Rollatoren Deutschlands. Er ist bundesweit in Sanitätshäusern erhältlich und unsere Kunden sind rundum zufrieden.

Verbessern auch Sie mit ello Ihren Alltag und tun Sie sich so etwas Gutes: Auf einen spontanen Kaffee in der Stadt oder einfach mal die Sonne auf der Parkbank genießen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrer Broschüre.

Vielen Dank

A handwritten signature in blue ink that reads "B. Rudolph". The signature is fluid and cursive.

Benjamin Rudolph  
Geschäftsführer

„Schöne Momente teile ich  
gerne mit anderen.“



# Was andere über ello sagen:



## Dr. Ulrich Lindemann


Robert-Bosch-Krankenhaus  
Abteilung Geriatrische Rehabilitation

„Die heute üblicherweise benutzten Rollator-Modelle stoßen in einigen alltäglichen Situationen an ihre Grenzen und können sogar die Sicherheit der Nutzer beeinträchtigen. Ein Rollator mit integrierter, intelligenter Technologie, die Problemsituationen erkennt und Lösungen anbietet, wird hier benötigt.“



## Werner Kries

„Ich bin begeistert! Der ello motiviert mich wieder längere Strecken zu laufen - dem elektrischen Antrieb sei Dank. Somit kann ich auch draußen etwas für meine Fitness tun.“

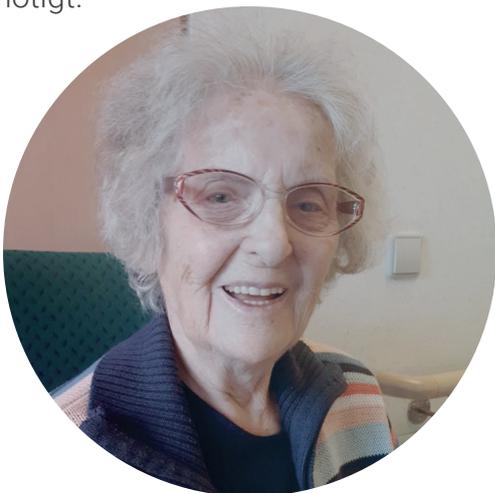

## Anneliese Theurer

„Meine Kinder haben sich im Internet informiert und ich durfte den ello im Sanitätshaus ausprobieren. Da haben sie sich viel Zeit für mich genommen und alle meine Fragen beantwortet. Sehr zuverlässig.“



## Eva Gramsch

„Die Räder sind groß, der Motor ist da – der elektrische Rollator ist so leicht zu handhaben, dass es auch ältere Menschen schaffen können. Also ich würde mir den zulegen!“

# Wo Rollatoren aufgeben, kommt ello in Fahrt.

Viele Nutzer herkömmlicher Rollatoren haben laut einer Studie des Robert-Bosch-Krankenhauses erhebliche Schwierigkeiten im täglichen Gebrauch.

## 83%

haben Schwierigkeiten beim Bergabbremsen

**Bergab regelt der Antrieb die Geschwindigkeit automatisch herunter, so dass der Nutzer nicht selbst bremsen muss.**

Das Bergabgehen mit einem Rollator ist für den Großteil der Rollator-Nutzer ein Problem. Durch das Eigengewicht, auch ohne dass sich der Benutzer aufstützt, droht der Rollator wegzurollen. Ältere Menschen können die Geschwindigkeit mit der installierten mechanischen Bremse nicht wirksam regulieren, da Ihnen hierfür das Feingefühl in der Hand fehlt. Für den Großteil der Rollator Nutzer endet die Mobilität damit an einer Steigung.

## 77%

tun sich schwer beim Überwinden von Hindernissen

**Hindernisse wie Bordsteinkanten kann der Nutzer einfach beim Vorwärtsgehen überwinden.**

Bei einer Bordsteinkante muss der Rollator angehoben oder die Kante durch Rückwärtsgehen überwunden werden. Ein Großteil der Nutzer kann seinen Rollator nicht anheben. Das Rückwärtsgehen birgt Risiken.

## 76%

haben Probleme beim Bergaufschieben


**Der elektrische Antrieb „schiebt“ den Rollator selbstständig in der Gehgeschwindigkeit des Nutzers.**

Beim Bergaufgehen ist das Problem, dass auch ein nicht beladener Rollator immer noch mind. 10 Kilogramm wiegt. Für ältere Menschen mit weniger Kraft ist es dadurch sehr mühsam auch leichte Steigungen zu überwinden. Schnell führt dies zu einer falschen Haltung und zu schneller Ermüdung.





„Mit erstaunlicher  
Leichtigkeit durch  
den Alltag.“

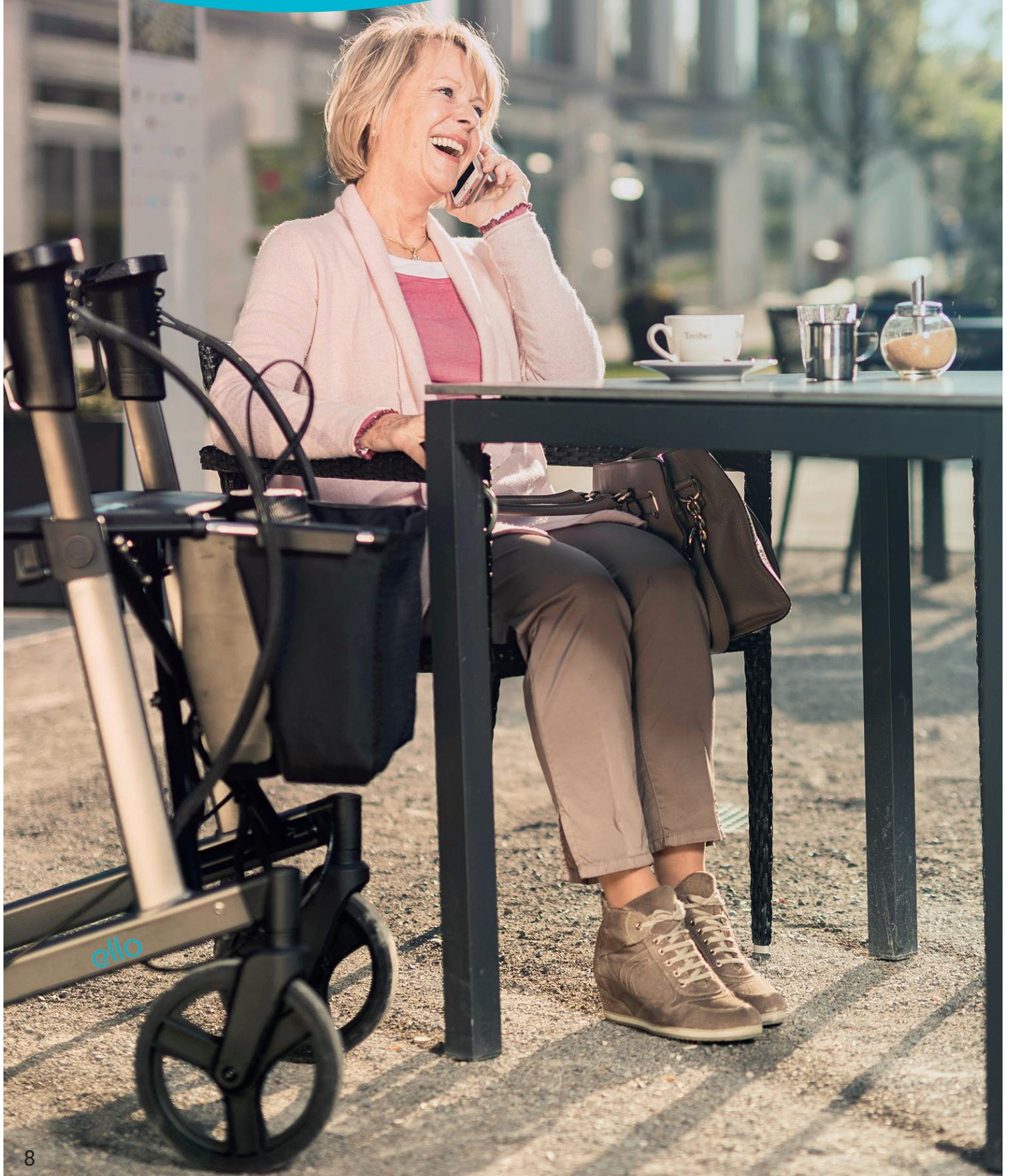

# Wegweisend modern, und trotzdem kultiviert.

## Bewegung ist Lebensfreude

ello ist ein Rollator, der durch seinen elektrischen Antrieb für mehr Sicherheit und Komfort sorgt. Hindernisse oder Einkäufe, die mit herkömmlichen, rein mechanischen Rollatoren nur schwer oder gar nicht zu überwinden sind, meistert er mit Leichtigkeit ohne zusätzlichen Kraftaufwand. Dazu unterstützen weitere Funktionen wie ein integrierter SOS-Ruf, eine Ortungsfunktion, eine Beleuchtung und eine automatische Bremse die bequeme und sichere Fortbewegung – und das bedeutet: mehr Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alltag.

## Zuladung

Besonders unterstützt ello beim Bergauf- und Bergabgehen und wenn er mit Gegenständen beladen wird. Durch den elektrischen Antrieb und die automatische Bremse wird das Schieben und Bremsen des Rollators unterstützt, wodurch weniger Kraft aufgewendet werden muss. Außerdem kann durch das zusätzliche Gewicht der Hinterräder eines elektrischen Rollators, in der vorn befestigten Tasche, mehr zugeladen werden.

## Kinderleicht zu bedienen

So einfach funktioniert ello: Sie legen ihren Daumen auf den Sensor und schon fährt ello sehr langsam los. Sobald Sie den Daumen wegnehmen oder die Hand vom ello nehmen, bleibt er sofort stehen.

## Vermeidung von Stürzen

ello verfügt über eine automatische Bremse, die standardmäßig aktiviert ist. Die automatische Bremse hält die eingestellte Geschwindigkeit und verhindert ein plötzliches Wegrollen des Rollators. So werden Stürze zum Beispiel bei einem Schwächeanfall oder der Anfahrt eines Busses verhindert.



# Deutsches Unternehmen im Herzen Stuttgarts

## Elektrische Mobilitätslösungen von morgen

Das Unternehmen hinter ello ist eMovements. Wir sind ein deutsches Unternehmen mit dem Hauptsitz in Stuttgart. Wir vereinen deutsche Ingenieurskunst mit schwäbischem Entwicklergeist und entwickeln so elektrische Mobilitätslösungen von morgen .

## Auto, Kettensäge, ello

Damit reihen wir uns ein in eine lange Geschichte der Innovationen: Nicht nur das Auto kommt aus Stuttgart, sondern beispielsweise auch die Kettensäge. Alles neue Produkte, die dem Leben mehr Komfort geben und heute nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken sind.

## Jederzeit für Sie da

Bei uns arbeiten 15 Mitarbeiter, die alle kräftig mit anpacken. Außerdem pflegen wir eine enge Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Medizinern aus der Universität Stuttgart und dem Robert Bosch Krankenhaus.



# Interesse geweckt?



Ansprechpartner:

Alexander Giustolisi  
Verkaufsleiter

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin zum Probefahren im nächsten Sanitätshaus.

Ich helfe Ihnen gerne dabei:

**Tel.: 0711 6648 7347**

Bei Fragen oder Anmerkungen können Sie uns jederzeit anrufen oder wir rufen Sie zu Ihrem Wunschtermin zurück.

Weitere Infos finden Sie auch im Internet:

**[www.ello-info.de](http://www.ello-info.de)**  
**[kontakt@ello-info.de](mailto:kontakt@ello-info.de)**

„Testen Sie den ello in einem Sanitätshaus in Ihrer Nähe“



10 von 10 Kunden  
würden ello  
weiterempfehlen



In Deutschland,  
Österreich und  
Schweiz erhältlich



In über  
100 Sanitätshäusern  
bis Ende 2018



Deutsches  
Unternehmen



Bekannt aus  
den Medien



ello

Der elektrische Rollator

Impressum:

**eMovements GmbH**

Schwabstr. 33

70197 Stuttgart

Geschäftsführer: Benjamin Rudolph

Handelsregister: B 756302 | Amtsgericht Stuttgart

USt-IdNr: DE305725779

Vi.S.d.P.: Benjamin Rudolph